

Knotless SutureTak™ Instability Repair

Kirurgisk teknik

DK

1. Mobilisér labrum, og skab et blødende leje for at fremme vævshelingen på knogle. Før boreguiden gennem cannula, og placér den på glenoidkanten. Skab et borehul til ankeret ved at føre boret frem gennem boreguiden, indtil dens krave kommer i kontakt med boreguidens håndtag. Rotér boret 2-3 gange i hård knogle for at lade borets riller fjerne rester fra hullets bund. Der kan om ønsket bruges en offset-guide til at placere det Knotless SutureTak-anker 1.5 mm på fladen af glenoid for lettere at skabe en større labral buffer.
2. Indfør ankeret gennem boreguiden og ind i knoglen vha. forsigtig sammenpresning, indtil indføringshåndtaget ligger helt ind til guidens bagside. Frigør de profilerede suturer, og fjern indføringshåndtaget og boreguiden.
3. Hent suturen gennem anterior-superior-portalen ved hjælp af en KingFisher®. Indsæt en kurvet SutureLasso™ (højrekrumning til højre skulder) i anterior-superior-cannula, og før den gennem det capsulo-labrale væv inferiørt for ankeret. Før Nitinol-wireløkken ind i leddet. Hent wireløkken gennem anterior-superior-portalen ved hjælp af en KingFisher.
4. Indfør suturen gennem Nitinol-wireløkken. Træk wireløkken tilbage gennem SutureLasso for at trække suturen til den distale ende af SutureLassoen. Fjern SutureLasso med Nitinol-wiren for at trække suturen med gennem labralvævet.
5. Indfør halvdelen af den hvide del af suturen gennem Nitinol-wireløkken fra suturankeret. Fold suturen over wiren med dine fingre. Træk i den modsatte ende af ankerwiren for at føre suturen tilbage i ankeret. Før Nitinol-wiren frem med gentagne lette træk, indtil suturen er ført gennem ankeret og ud gennem cannula.
6. Træk i den frie ende af suturen, indtil den ønskede tension er opnået. Der kan benyttes en Grasper til at placere labrum på den ønskede placering indtil den ønskede tension. Klip suturen helt tæt ved hjælp af en FiberWire®-suture cutter.




Bemærk venligst, at det muligvis ikke er alle produkter, der er omtalt i denne brochure/kirurgiske teknik-guide, som kan leveres i alle lande. Spørg Arthrex Kundeservice eller din lokale Arthrex-repræsentant før bestilling, om det ønskede produkt kan leveres. Mange tak.

If you would like to order any of the mentioned products in this surgical technique, please contact your local Arthrex Representative.

Denne teknik beskrivelse leveres som et uddannelsesmæssigt værktøj og en klinisk hjælp til korrekt licenserede læger ved anvendelse af specifikke Arthrex-produkter. Ved anvendelse skal lægen bruge sin faglige vurdering, når der tages beslutning vedrørende produktanvendelse og teknik. I den forbindelse skal lægen basere sig på egen uddannelse, erfaring samt relevant medicinsk litteratur og produktets brugsvejledning.

Nummereringen i denne oversættelse henviser til nummereringen af de kirurgiske trin/billeder, som findes i den originale engelsksprogede teknikvejledning.

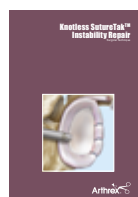

[Knotless SutureTak Instability Repair](#)

Du kan se de amerikanske patentoplysninger på www.arthrex.com/corporate/virtual-patent-marking

© Arthrex GmbH, 2016. Alle rettigheder forbeholdt.
LT2-0511-DK-A